



Diversey™

# Oxivir Excel™ CE

Koncentrerat rengörings- & desinfektionsmedel med bredspektrumeffekt för icke invasiva medicinska instrument och för icke porösa hårda ytor.

## Produktbeskrivning

Diversey Oxivir Excel™ CE är ett högkoncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel som har ett brett spektrum mot sjukdomsalstrande bakterier och virus. Produktens sammansättning ger en kort kontakttid. Baserad på Diverseys patenterade Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) formulering kan Oxivir Excel™ CE användas på icke invasiva medicinska instrument, hårda, icke porösa ytor och vissa textila möbler.

## Produktegenskaper

- Bakterie-, virus- och jästdödande
- Desinficerande och effektiv mot alla virus på enbart 30 sekunder
- Säker för både användare och ytor
- Effektiv rengöring
- Parfymfri
- Bryts aktivt ner till vatten och syre
- Ingen eftersköljning behövs

## Produktfördelar

Produkten avdödar ett brett spektrum av virus och bakterier och ger den högsta möjliga säkerheten för kunder, patienter och personal. Oxivir Excel är testad enligt Europeiska normer och är effektiv mot ett flertal sjukdomsframkallande organismer inklusive *Poliovirus*, *Adenovirus* och *Murin norovirus*. Produkten är även testad effektiv mot alla höljeförsedda virus såsom: HIV, HBV, HVC, *Influenza*, *Vaccinia*- och *Coronavirus*.

- Kort kontakttid som säkerställer att ytan är fuktig under verknings tiden. Utmärkta rengöringsegenskaper och inte brandfarlig. Säker att använda i närheten av patienter, personal och besökare
- Ingen farlig miljöklassificering och inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt, vilket ger en hög säkerhet för användaren. Innehåller inga irriterande ämnen vid inandning av produkten.
- AHP formuleringen är skonsam mot ytmaterial och förlänger därmed materialets livslängd
- Utmärkt att använda på handkontaktytor under pågående smittspridning i en pandemi samt för alla högriskområden inom sjukvård och äldreboende

## Bruksanvisning

### Applikation/produkt

Sprayrengöring och desinfektion (brukslösning):

1. Avlägsna lös smuts.
2. Spraya på torkduken och torka ytan eller spraya direkt på ytan som ska rengöras.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka.

Hinkmetod, rengöring och desinfektion (brukslösning):

1. Avlägsna lös smuts.
2. Applicera på ytor med mopp/trasa.
3. Säkerställ att ytan förblir fuktad under kontakttiden, låt ytan lufttorka
4. Byt brukslösning om den är synbart nedsmutsad eller minst var 24:e timme.

**Viktigt:** Använd inte varmt vatten. Kombinera inte med andra produkter. Använd inte produkten på ytor känsliga för syra.



© A.I.S.E.

## Teknisk information

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Utseende:                 | Klar, färglös vätska     |
| Relativ densitet [20° C]: | 1.065                    |
| pH brukslösning:          | 1.9                      |
| pH koncentrat:            | 0.55                     |
| Hållbarhet:               | 2 år i oöppnad behållare |
| Doft:                     | Neutral                  |

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om användning och hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvaras i sluten originalförpackning. Undvik extrema temperaturer. Reagerar med oxiderbara ämnen.

## Att beakta

Oxivir Excel™ CE är lämplig att använda på alla tänkbara ytor förutsatt att man följer rekommenderade anvisningar.

## Miljöinformation

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen, EC 648/2004

## Mikrobiologisk information

Oxivir Excel™ CE är godkänd enligt: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN16777, EN16615, EN1276, EN1650, EN13704

| Krav                                 | EN Test | Kontakt tid | Spädning / lösning | ml / 1L vatten |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------|----------------|
| <i>Bakterieavdödande</i>             | EN13727 | 30 sek      | 2%                 | 20 ml          |
|                                      | EN13697 | 5 min       | 1.5%               | 15 ml          |
|                                      | EN16615 | 1 min       | 1%                 | 10 ml          |
| <i>Fungicida-/<br/>jästavdödande</i> | EN13624 | 5 min       | 4%                 | 40 ml          |
|                                      | EN13697 | 5 min       | 3,5%               | 35 ml          |
|                                      | EN16615 | 1 min       | 1%                 | 10 ml          |
| <i>Virusavdödande</i>                | EN14476 | 5 min       | 2%                 | 20 ml          |
|                                      |         | 30 sek      | 4%                 | 40ml           |

## Förpackningsstorlekar

|                            |                     |                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer              | Förpackningsstorlek | Förpackningstyp |
| 100941436 Oxivir Excel™ CE | 2x5 Liter           | Plastdunk       |